

PEOPLE HAVE PRIORITY



Bez kabla
sa iznimno malom glavom



entran

Think Endo Cordless



Krećite se slobodno, bez kabla

Sada je moguće imati sve – potpunu slobodu kretanja bez ometanja kabla, siguran tretman te iznimnu preglednost tijekom postupka zahvaljujući iznimno maloj glavi. Zahvaljujući uređaju Entran, ravnom nasadniku bez kabla iz W&H.

Radi nježno...

Ergonomski oblik ravnog nasadnika pridonosi uspjehu endodontskog liječenja. Entran je uvjerljivo rješenje bez kabla, za strojnu pripremu korijenskog kanala i to ne samo zbog toga što osigurava slobodu kretanja, već i zbog njegovog posebno oblikovanog kutnog nasadnika te male težine koja u velikoj mjeri smanjuje umaranje vaših ruku.

... sa iznimno malom glavom ...

Glava uređaja Entran je mala i kompaktna kako bi se osiguralo da vaše ruke i oči rade skladno te omogućuje optimalan pristup području liječenja.

Zahvaljujući funkciji Easy Click, uređaj i koljičnik mogu se brzo i jednostavno namještati.

Ravni nasadnik može se rotirati u bilo kojem smjeru - najviše do 360°.

... u svim područjima primjene

S rotirajućim nastavcima za pripremu korijenskog kanala, Entran vam nudi puni raspon endodontskih postupaka. Za upotrebu u Crown-Down ili Single-length načinu rada.



Siguran postupak

Uspješno liječenje korijenskog kanala zahtijeva inteligentne alate. Entran reagira odmah, čim nastavak dostigne traženi okretni moment, kojeg ste programirali. To rezultira automatskom reakcijom uređaja Entran, čineći vaš postupak jednostavnim i sigurnim u svakodnevnoj upotrebi.

Integrirane su sve funkcije

Svaka funkcija koju trebate za siguran i izvanredan postupak integrirana je u Entran uređaju. To znači da stavljamo naglasak na što jednostavniju i sigurniju upotrebu uređaja.

Željeni okretni moment možete namjestiti pritiskom na gumb. Odabrana vrijednost isčitava se putem LED kontrolnog prstena koji okružuje kontrolni gumb. Za vrijeme postupka LED kontrolni prsten svijetli kada se dostigne 75% unaprijed podešenog okretnog momenta. Entran pripada posljednoj generaciji tehnologije W&H te kao mali, kompaktan i bežični uređaj, nudi najvišu razinu sigurnosti.



Auto Reverse

Pri dostignutom unaprijed podešenom okretnom momentu (1), pogon ravnog nasadnika radi u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (2), odpuštajući nastavak. Zatim se pogon zaustavlja (3).



Auto Forward

Prilikom dostignutog unaprijed podešenog okretnog momenta (1) u načinu Auto-Forward, nastavak se automatski vraća u suprotan smjer (2) te se odpušta. Zatim nastavlja s rotiranjem u smjeru kazaljke na satu (3).



Stabilna brzina

Stabilna brzina od 300 okr./min. na instrumentu za tretiranje korijenskog kanala omogućena je ne samo putem točnog, iznimno malog elektroničkog sustava već i zbog dugotrajne litij-ionske punjive baterije koja je jedinstvena u ovom asortimanu te se može uvijek nadopuniti bez negativnog učinka na trajnost uređaja. Ako baterijski prikaz treperi, možete završiti liječenje pacijenta. S potpuno napunjenom baterijom možete izvršiti oko 30 tretmana liječenja.



Prikladnije liječenje

Entran vam nudi više od ukupne količine svojih mogućnosti. Ne samo slobodu kretanja, već i sigurnosne funkcije i jednostavnost upotrebe, koje određuju s kojim bi uređajem ljudi radije radili.

Brza promjena nastavka

Gumb za otpuštanje nastavka omogućuje jednostavno i sigurno uklanjanje nastavka.

Ergonomski koljičnik

Glava koljičnika oblikovana je prema ergonomskih zahtjevima. Pomaže u opuštanju vaše ruke pri osjetljivom radu smanjujući napor.

Ravan nasadnik bez proklizavanja pogona

Entran savršeno leži u vašoj ruci. Siva i mekana na dodir površina pogona nasadnika nudi vam najvišu razinu udobnosti i upravljanja.

Tanko tijelo

Tanko tijelo i iznimno mala glava povećavaju preglednost tijekom rada. Dvije važne činjenice koje pospešuju uspješnost liječenja.

Higijena i njega

Glava koljičnika može se sterilizirati i termodezinficirati. Pogon nasadnika i stanica za punjenje mogu se dezinficirati brisanjem, brzo i jednostavno očistiti i biti spremni za slijedeće liječenje.

Isporučena oprema

- > Pogon **koljičnika**
- > Glava koljičnika
- > Jedinica za punjenje
- > Litij-onska punjiva baterija 3,7 V
- > Kabel za struju

Dodatna oprema

- > Držać **koljičnika**
- > W&H Service Oil F1, MD-400
- > Glava raspršivača s adapterom raspršivača za ravni nasadnik i koljičnik
- > W&H Assistina adapter za glavu koljičnika

Jamstvo



- > **24 mjeseca:** pogon **nasadnika**, glava koljičnika, jedinica za punjenje
- > **12 mjeseci:** punjiva baterija



Tehnički podaci



Glava koljičnika EB-16

Odnos prijenosa	16:1
Vrsta spojke	W&H spojka
Preporučeni nastavci prema EN ISO 1797-1:1995	Nastavci za pripremu kanala za 300 okr./min. držak - Ø (vrsta 1) 2,35 mm
Težina	35 g
Higijena	  termodezinficirati / može se sterilizirati



Pogon nasadnika EB-3 H

Vrsta punjive baterije	Litij-onska 3,7 V
Nominalni kapacitet:	680 mAh
Brzina	300 okr./min. pri turpiji
Razine okretnog momenta	4,0 maks. 4,0 Ncm 2,5 maks. 2,5 Ncm 1,5 maks. 1,5 Ncm 1,0 maks. 1,0 Ncm 0,5 maks. 0,5 Ncm
Težina	85 g
Higijena	dezinfekcija brisanjem



Jedinica za punjenje

Napajanje	100–240 V {+/-10%}
Frekvencija	50–60 Hz
Dimenzije (Š x D x V)	95 x 159 x 95 mm
Težina	265 g
Higijena	dezinfekcija brisanjem



W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Naručite Entran od vašeg lokalnog
dobavljača dentalne opreme.