

KATANA™ ZIRCONIA BLOCK GLODANJE



KATANA™ Zirconia Block

Budućnost i rješenje inovativnih translucentnih Zirconia koja su najsličnija prirodnom zubu uz brzo sintranje. Suradnja tvrtke Kuraray Noritake Dental s vrhunskom tehnologijom materijala i Dentsply Sirona CEREC SpeedFire sada omogućuju brzo sintranje i restauraciju punog cirkona (30 minuta).



Intraoral scanning
Designing¹²

Milling
15 minutes³

Sintering
30 minutes³

*1 This product is exclusively for use with CEREC *2 CEREC software 4.5.2 is necessary *3 In a case involving a crown(dry mill)

VAŽNE TOČKE KOJE MORATE IMATI NA UMU PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI KATANA ZIRCONIA BLOCK

Preporuča se izvođenje suhog glodanja s pomoću Dry Milling Suction Unit (Dentsply Sirona).

Za pojedinosti kontaktirajte Dentsply Sirona Inc.


Ako se izvodi mokro glodanje pomoću rashlađene vode kontaminirano glodanim materijalom koji nije Zirconia (npr. staklena keramika na bazi silicija, kao što je litij-disilikatno staklo itd.), prozirnost proteze može se smanjiti nakon pečenja. Prije glodanja potrebno je čišćenje komore za glodanje/brušenje; promijenite vodu za hlađenje i očistite unutrašnjost pumpe. Dobra je praksa imati tri spremnika za učinkovitije mokro glodanje.

MOKRO GLODANJE POMOĆU VIŠE SPREMNIKA

Zamijeniti spremnike CEREC glodalice na sljedeći način:



1 Pripremite spremnik koji će zadržati rashlađenu vodu za glodanje staklokeramike na bazi silicija (staklokeramički spremnik za rashlađenu vodu); spremnik za rashlađenu vodu za glodanje zircona (zirconia-spremnik za rashlađenu vodu) i spremnik za držanje vode iz slavine za pranje pumpi (spremnik vode za pranje).

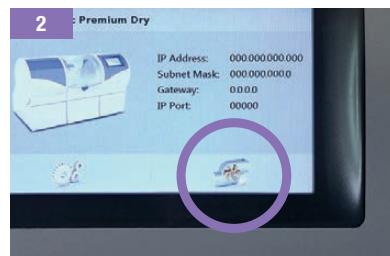


2 Postavite spremnik s rashlađenom vodom za staklokeramiku. Pritisnite gumb na zaslonu kako bi otklonili nepotrebni prah koji se nalazi unutar komore za glodanje.



3 Zatim temeljito isperite ostatke glodanja iz filtera komore za glodanje i mljeveni prah iz komornog filtera.



4 Uklonite spremnik za rashladenu vodu za staklokeramiku i instalirajte spremnik vode za pranje.

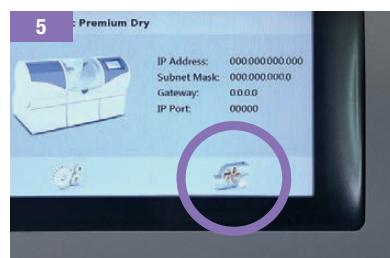

5 Pritisnite Pump tipku na zaslonu za pranje unutrašnjosti pumpe.



6 Skinite spremnik vode za pranje i instalirajte cirkonijev spremnik za hladnu vodu. Zatim prebacite uredaj na mokri način glodanja prije početka glodanja.

* Vodu iz slavine u spremniku za pranje treba ukloniti.

GLODANJE STAKLA NA BAZI SILICIJA POSLIJE GLODANJA ZIRCONA

Uklonite zirconia-spremnik za hladnu vodu i ugradite staklokeramički spremnik za rashlađenu vodu. Prebacite uredaj na mokro glodanje prije početka glodanja.



Fabricate full natural zirconia restorations with **KATANA™ Zirconia Block** and **Dentsply Sirona's CEREC® System**. The perfect combination for powerful and esthetic restorations.



The specifications and appearance of the product are subject to change without notice. Printed color can be slightly different from actual color. "KATANA" and "CERABIEN" are trademarks of Noritake Co., Ltd. "PANAVIA" and "CLEARFIL" are trademarks of Kuraray Co., Ltd. "CEREC" and "SpeedFire" are trademarks of Dentsply Sirona Inc.